


درجه حرارت نرمال چیست ؟

اگرچه حرارت 37°C درجه حرارت نرمال خوانده میشود اما این مقدار در محدوده $36/1^{\circ}\text{C}$ تا $37/2^{\circ}\text{C}$ هم نرمال تلقی میشود. درجه حرارت تحت عواملی مانند فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن و... قابل تغییر است. همچنین درجه حرارت بدن در صبح هنگام پایین تر از عصر است. دمای اندازه گیری شده زیر زبانی $0/5$ تا $1/0$ درجه سانتیگراد از دمای مقعدی کمتر و $0/5$ تا $1/0$ درجه از دمای اندازه گیری شده زیر بغلی بیشتر است.

مشخصات کلی دستگاه :

- محدوده اندازه گیری : 32°C ~ 43°C
- پیغام دمای طب 38°C با ۳ بوق متوالی
- اندازه گیری دما فقط در یک ثانیه
- دقت سنسور : $0/2^{\circ}\text{C} \pm$ 32°C ~ 43°C
- حافظه نگهداری تا ۱۰ مورد قبلی
- خاموش شدن خودکار پس از ۲۰ ثانیه
- نوع باتری : باتری لیتیوم CR2032
- ابعاد : $140 \times 30 \times 30$ mm
- تب سنج مادون قرمز برای گوش
- جستجوگر ضد آب میباشد.


نحوه عملکرد :

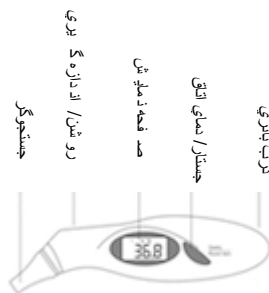

- ◆ دکمه روشن / اندازه گیری را فشار دهید. با شنیدن صدای بوق دستگاه روشن شده و آخرین درجه اندازه گیری شده را نمایش میدهد.
- ◆ سر دماسنج (جستجوگر) را تا حد امکان در داخل گوش فرو کرده، اگر دماسنج به راحتی داخل گوش نمیرود، با دست دیگر گوش خود را به سمت عقب کشیده تا دماسنج کاملاً داخل گوش شود.
- ◆ دکمه روشن / اندازه گیری را فشار دهید. بعد از شنیدن صدای بوق اول دستگاه آماده اندازه گیری میباشد. پس از ۱ یا ۲ ثانیه صدای بوق ممتدی میشوند و این به این معناست که دمای بدن شما اندازه گیری شده است.

- ♦ پس از اندازه گیری دماسنج را با الکل طبی کاملا تمیز کنید.
- ♦ دستگاه پس از حدود ۲۰ ثانیه به صورت اتوماتیک خاموش میشود.

نحوه تعویض باتری:

- هنگامی که علامت “” در سمت راست صفحه نمایش داده شد اقدام به تعویض باتری کنید.
- درب محافظ باتری را بردارید.
- زبانه باتری را حدود ۱۸mm بیرون بکشید
- ابزار مناسبی برای درآوردن باتری انتخاب کرده و باتری را تعویض کنید.



نکات مهم:

- * این دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- * در حین اندازه گیری درجه حرارت از راه رفتن، دویدن و صحبت کردن بپرهیزید.
- * پس از استفاده، آن را در جعبه محافظ قرار دهید.
- * از قرار دادن تب سنج در معرض نور خورشید، گرد و غبار، رطوبت و حرارت زیاد جدا خودداری کنید.

هایتک آمیزه ای از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

♥ درباره شرکت هایتک

هایتک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود و هم اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری هایتک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

هایتک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی هایتک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.
 ▶ برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات هایتک به سایت www.hitec-med.ir مراجعه نمایید.